

Modulo SANIFICAZIONE PERIODICA/ TERMINALE DELLE TERMOCULLE								
SANIFICAZIONE PERIODICA (P) SANIFICAZIONE TERMINALE (T) TERMOCULLA GUASTA (G)		<input type="checkbox"/> PO G. RODOLICO	<input type="checkbox"/> PO SAN MARCO	ANNO _____ MESE _____	UO _____			
* Inserire soluzione detergente disinfettante utilizzata		GIORNO DEL MESE						
Tipologia - Modello e numero apparecchiatura		ORARIO : : : : : : :	PERIODICA P P P P P P P	TERMINALE T T T T T T T	TERMOCULLA GUASTA G G G G G G G			
Eseguire l'igiene delle mani, indossare i guanti monouso e DPI								
Preparare le soluzioni detergente - disinfettante (Sekusept 1% e 4% o altre comparabili)								
Svuotare la termoculla e smontare le parti sottostanti il piano di appoggio, come indicato nel manuale d'uso								
Smontare la ventola, ove previsto								
I N T E R N O	Immergere guaine di gestione dei tubi, guarnizioni degli oblò e ventola nella soluzione detergente-disinfettante per il tempo di contatto previsto dalla scheda tecnica							
	Nebulizzare la soluzione detergente disinfettante (Sekusept 1%) in spray sui restanti componenti, procedendo dall'interno verso l'esterno e dall'alto verso il basso	*	*	*	*	*	*	*
	Lasciare agire per il tempo di contatto previsto dalla scheda tecnica (Sekusept 5 min.)							
	Distribuire la soluzione su un panno pulito e strofinare le superfici da pulire con la stessa sequenza							
	Sciacquare con acqua pulita							
	Asciugare con un telo pulito ed eliminare guanti e teli utilizzati nei rifiuti speciali							
	Eseguire l'igiene delle mani e indossare guanti monouso							
	Nebulizzare la soluzione detergente disinfettante in spray (Sekusept 4% o altra comparabile), procedendo dall'interno verso l'esterno e dall'alto verso il basso	*	*	*	*	*	*	*
	Lasciare agire per il tempo di contatto previsto dalla scheda tecnica (Sekusept 15 min.)							
	Sciacquare con acqua pulita							
Asciugare con un telo pulito								
Riposizionare tutte le parti smontate								
Detergere e disinfettare il sistema di umidificazione (v. manuale specifico della termoculla)								
Risciacquare con acqua bidistillata								
Eliminare guanti usati e panni usati nei rifiuti speciali								
D E T E R M I N A T O	Eseguire l'igiene delle mani ed indossare guanti monouso							
	Nebulizzare la soluzione detergente disinfettante (Sekusept 1% o altra comparabile) sulle parti esterne della termoculla, procedendo dall'alto verso il basso	*	*	*	*	*	*	*
	Lasciare agire per il tempo di contatto previsto dalla scheda tecnica (Sekusept 5 min.)							
	Sciacquare con acqua pulita							
	Asciugare con un telo pulito							
	Eliminare guanti usati e panni usati nei rifiuti speciali							
	Eseguire l'igiene delle mani ed indossare guanti monouso							
	Nebulizzare la soluzione detergente disinfettante in spray (Sekusept 4% o altra comparabile)	*	*	*	*	*	*	*
	Lasciare agire per il tempo di contatto previsto dalla scheda tecnica (Sekusept 15 min.)							
	Sciacquare con acqua pulita							
Asciugare con un telo pulito								
Rimuovere guanti monouso e panno ed eliminarli come rifiuti pericolosi a rischio infettivo								
FIRMA OSS		FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS
NOME, COGNOME E DATA DI NASCITA DEL NEONATO PRESENTE PRIMA								