

Modulo SANIFICAZIONE TERMINALE DELLE TERMOCULLE TRANSITORIE										
SANIFICAZIONE PERIODICA (P) SANIFICAZIONE TERMINALE (T) TERMOCULLA GUASTA (G)		<input type="checkbox"/> PO G. RODOLICO <input type="checkbox"/> PO SAN MARCO	ANNO _____ MESE _____	UO _____						
* Inserire soluzione detergente disinfettante utilizzata _____										
Tipologia - Modello e numero apparecchiatura _____		GIORNO _____								
		ORARIO _____								
		TERMINALE _____								
		TERMOCULLA GUASTA _____								
Eseguire l'igiene delle mani, indossare i guanti monouso e DPI										
Preparare le soluzioni detergente - disinfettante (Sekusept 1% e 4% o altre comparabili)										
Svuotare la termoculla e smontare le parti sottostanti il piano di appoggio, come indicato nel manuale d' uso										
Smontare la ventola, ove previsto										
Immergere guaine di gestione dei tubi, guarnizioni degli oblò e ventola nella soluzione detergente-disinfettante per il tempo di contatto previsto dalla scheda tecnica										
Nebulizzare la soluzione detergente disinfettante (Sekusept 1%) in spray sui restanti componenti, procedendo dall'interno verso l'esterno e dall'alto verso il basso										
Lasciare agire per il tempo di contatto previsto dalla scheda tecnica (Sekusept 5 min.)										
Distribuire la soluzione su un panno pulito e strofinare le superfici da pulire, stessa										
Sciacquare con acqua pulita										
Asciugare con un telo pulito ed eliminare guanti e teli utilizzati nei rifiuti speciali										
Eseguire l'igiene delle mani e indossare guanti monouso										
Nebulizzare la soluzione detergente disinfettante in spray (Sekusept 4% o altra comparabile), procedendo dall'interno verso l'esterno e dall'alto verso il basso										
Lasciare agire per il tempo di contatto previsto dalla scheda tecnica (Sekusept 15 min.)										
Sciacquare con acqua pulita										
Asciugare con un telo pulito										
Riposizionare tutte le parti smontate										
Detergere e disinfettare il sistema di umidificazione (v. manuale specifico della termoculla)										
Risciacquare con acqua bidistillata										
Eliminare guanti usati e panni usati nei rifiuti speciali										
Eseguire l'igiene delle mani ed indossare guanti monouso										
Nebulizzare la soluzione detergente disinfettante (Sekusept 1% o altra comparabile) sulle parti esterne della termoculla, procedendo dall'alto verso il basso										
Lasciare agire per il tempo di contatto previsto dalla scheda tecnica (Sekusept 5 min.)										
Sciacquare con acqua pulita										
Asciugare con un telo pulito										
Eliminare guanti usati e panni usati nei rifiuti speciali										
Eseguire l'igiene delle mani ed indossare guanti monouso										
Nebulizzare la soluzione detergente disinfettante in spray (Sekusept 4% o altra comparabile)										
Lasciare agire per il tempo di contatto previsto dalla scheda tecnica (Sekusept 15 min.)										
Sciacquare con acqua pulita										
Asciugare con un telo pulito										
Rimuovere guanti monouso e panno ed eliminarli come rifiuti pericolosi a rischio infettivo										
		Firma OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	
		NOME, COGNOME E DATA DI NASCITA DEL NEONATO PRESENTE PRIMA								