

Modulo SANIFICAZIONE DELLE ISOLE NEONATALI		<input type="checkbox"/> PO G. RODOLICO <input type="checkbox"/> PO SAN MARCO															
*SANIFICAZIONE TERMINALE (T) <input type="checkbox"/> *RICONDIZIONAMENTO (R) <input type="checkbox"/> ISOLA NEONATALE GIUSTA (G) <input type="checkbox"/>		Utilizzata soluzione detergente disinfettante		ANNO _____ MESE _____		DATA ULTIMA SANIFICAZIONE MESE PRECEDENTE ____/____/____						*UO _____					
GIORNO DEL MESE																	
Tipologia - Modello e numero apparecchiatura		ORARIO															
		TERMINALE	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		RICONDIZIONAMENTO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
		ISOLA NEONATALE	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
Effettuare l'igiene delle mani ed indossare guanti monouso e DPI																	
Preparare le soluzioni detergente e disinfettante (Sekusept 1% e 4% o altre comparabili*, come indicato da scheda tecnica isola neonatale)																	
R I C O N D	Eseguire l'igiene delle mani e indossare i guanti monouso																
	Utilizzare disinfettante LC - GUAN salviette o soluzione detergente disinfettante (Sekusept 1% o altra comparabile*) spray su panno pulito																
	Passare il panno imbevuto sulla calotta e il corpo principale																
	Passare il panno imbevuto sul materassino e i piani laterali interni di appoggio																
LC-GUAN: Lasciare asciugare o asciugare con un panno dopo 5 min. SEKUSEPT: Risciacquare prima di asciugare																	
Rimuovere guanti monouso e panno ed eliminarli come rifiuti pericolosi a rischio infettivo																	
D E T E R S	Sanificare riflettore del riscaldatore della calotta con panno inumidito con alcol etilico a isola neonatale <b>spenta</b>																
	Sanificare la calotta e il corpo principale (attenzione pomelli) con panno imbevuto di soluzione detergente (Sekusept 1% o altra comparabile*) procedendo dalla parte più alta alla parte più bassa e lasciando agire per 5 min																
	Sanifica il materassino ed il suo piano di appoggio e le barriere di protezione dall'interno verso l'esterno e dall'alto verso il basso																
	Sciacquare con acqua pulita																
	Asciugare con un telo pulito																
	Detergere la sonda di temperatura con panno imbevuto con soluzione detergente-disinfettante																
Rimuovere guanti monouso e panno ed eliminarli come rifiuti pericolosi a rischio infettivo																	
Effettuare l'igiene delle mani ed indossare guanti monouso e DPI																	
D I S I N F	Disinfettare il riscaldatore della calotta con panno inumidito con alcol etilico a isola neonatale <b>spenta</b>																
	Sanificare la calotta e il corpo principale (attenzione pomelli) con panno imbevuto di soluzione detergente (Sekusept 4% o altro comparabile*) procedendo dalla parte più alta alla parte più bassa e lasciando agire per 15 min																
	Sanificare il materassino ed il suo piano di appoggio e le barriere di protezione dall'interno verso l'esterno e dall'alto verso il basso lasciando agire per il tempo di contatto previsto dalla scheda tecnica il prodotto.																
	Sciacquare con acqua pulita																
	Asciugare con un telo pulito																
	Rimuovere guanti monouso e panno ed eliminarli come rifiuti pericolosi a rischio infettivo																
Firma OSS																	