

SANIFICAZIONE TERMOCULLE **TERMINALE/PERIODICA**

SANIFICAZIONE TERMINALE/PERIODICA

- Eseguire igiene delle mani, indossare guanti monouso e DPI
- Preparare le soluzioni detergente – disinfettante (Sekusept 1% e 4%)
- Smontare la termoculla in tutte le sue parti

SANIFICAZIONE **INTERNA** TERMOCULLA

FASE 1

DETERSIONE

1. Immergere guaine di gestione dei tubi, guarnizioni degli oblò nella soluzione Sekusept all'1% per 5 min e poi strofinare
2. Nebulizzare la soluzione Sekusept 1% sui restanti componenti compresa la ventola, iniziando dalle parti interne della campana, lasciando agire per 5 min
3. Distribuire la soluzione su un panno in TNT pulito e strofinare le superfici da pulire con la stessa sequenza
4. Sciacquare con acqua pulita e asciugare con panno TNT pulito

Eliminare guanti usati
Igiene delle mani
Indossare nuovi guanti

FASE 2

DISINFEZIONE

1. Nebulizzare Sekusept al 4% iniziando dalle superfici interne della campana per 15 min
2. Sciacquare con acqua pulita e asciugare con panno pulito tutti i componenti
3. Riposizionare le parti smontate e chiudere la campana

FASE 3

1. Detergere e disinfettare il sistema di umidificazione
2. Risciacquare con acqua sterile

Eliminare guanti usati
Igiene delle mani
Indossare nuovi guanti

SANIFICAZIONE **ESTERNA** TERMOCULLA

FASE 1

DETERSIONE

1. Nebulizzare la soluzione Sekusept 1% sulle parti esterne della termoculla, procedendo dall'alto verso il basso per 5 min
2. Sciacquare con acqua pulita e asciugare con telo pulito

Eliminare guanti usati
Igiene delle mani
Indossare nuovi guanti

FASE 2

DISINFEZIONE

1. Nebulizzare Sekusept 4% per 15 min
2. Sciacquare con acqua pulita e asciugare con telo pulito

Eliminare guanti e panni usati

